

Belangrijke informatie NovoPen[®] Echo[®] en NovoPen[®] 5 Ref. 2016050310



[DATE]

Beste meneer, mevrouw,

Novo Nordisk heeft ontdekt dat er een probleem kan zijn met de patroonhouder van een beperkt aantal insulinepenen van het type NovoPen[®] Echo[®] en NovoPen[®] 5. De patroonhouder kan beschadigd raken als deze wordt schoongemaakt met bepaalde schoonmaakmiddelen. Als de pen wordt schoongemaakt volgens de instructies in de gebruikershandleiding, is er geen reden om aan te nemen dat de patroonhouder beschadigd raakt.

Uit voorzorg biedt Novo Nordisk diabetespatiënten, die een NovoPen[®] Echo[®] en/of NovoPen[®] 5 met de betreffende patroonhouder gebruiken, de mogelijkheid om de patroonhouder kosteloos om te wisselen. **U kunt het chargennummer van uw pen op www.novonordisk.nl invullen om te controleren of de patroonhouder van uw pen verwisseld moet worden.** U kunt hiervoor ook bellen met de afdeling Informatie en Service van Novo Nordisk via 0172-449600.

Hieronder zijn twee foto's van de patroonhouder weergegeven (afbeelding 1)



Afbeelding 1. Foto's van de patroonhouder die wordt gebruikt in de NovoPen[®] Echo[®] en NovoPen[®] 5.

U kunt de chargenummers vinden op de instelknop van de pen, zoals hieronder weergegeven (afbeelding 2).

NovoPen[®] Echo[®]



NovoPen[®] 5



Afbeelding 2. De rode vierkanten geven aan waar het chargennummer zich bevindt op. Bijvoorbeeld: het chargennummer op de pen links is FVG7364.

Gebruikt u een andere pen dan NovoPen[®] Echo[®] of NovoPen[®] 5, bijvoorbeeld NovoPen[®] 4, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt erop vertrouwen dat de pen naar behoren werkt.

Het gebruik van een pen met een beschadigde patroonhouder kan er mogelijk voor zorgen dat u minder insuline injecteert dan u heeft ingesteld, al is de kans hierop erg klein. Te weinig insuline kan leiden tot een hogere bloedsuikerspiegel. De verschijnselen van een hoge bloedsuikerspiegel (een hyper) treden meestal geleidelijk op en kunnen het volgende omvatten: een rode, droge huid; sufheid of vermoeidheid; droge mond; adem die naar fruit (aceton) ruikt; vaker plassen; dorst; verlies van eetlust; misselijkheid of braken. Het kan ook zijn dat u geen lichamelijke verschijnselen van een hoge bloedsuiker ervaart, maar het pas opmerkt tijdens bloedsuikermetingen.

Wat u moet doen als u gebruikmaakt van een NovoPen® Echo® en/of NovoPen® 5 die in aanmerking komt voor een nieuwe patroonhouder:

- Stop **nooit** uw behandeling met insuline zonder eerst met uw arts te overleggen.
- Let op uw bloedsuikerspiegels en wees alert op de verschijnselen van een hoge bloedsuikerspiegel. Als u een hoge bloedsuiker ervaart meet dan uw bloedsuikerspiegel zoals uw diabetesbehandelaar u dat heeft verteld. Neem vervolgens de juiste maatregelen en neem contact op met uw diabetesbehandelaar.
- Registreer uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aantal patroonhouders) op onze website, www.novonordisk.nl of neem contact op met de afdeling Informatie en Service. Na registratie ontvangt u een nieuwe patroonhouder voor uw pen.
- Meld alle eventuele bijwerkingen of klachten aan Novo Nordisk via onderstaande contactgegevens.

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken neem dan contact op met Novo Nordisk B.V. of uw diabetesbehandelaar.

De veiligheid van patiënten is van het grootste belang voor Novo Nordisk. Wij streven ernaar om producten van de hoogste kwaliteit te produceren. Wij betreuren de ontstane situatie en de mogelijke ongemakken die dit met zich mee kan brengen.

Met vriendelijke groet,
Novo Nordisk B.V.

.....

Voor meer informatie:

Novo Nordisk B.V.
Afdeling Informatie en Service
Flemingweg 18
2408 AV Alphen aan den Rijn
0172-449600 (tijdens kantooruren)

informatie@novonordisk.com
www.novonordisk.nl