

Medtronic Trading NL B.V.
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Postbus 4148
5604 EC Eindhoven
The Netherlands

Tel. +31 (0)40 711 7555
Fax +31 (0)40 711 7522
www.medtronic.nl

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Endo GIA™-vullingen voor chirurgische stapling voor eenmalig gebruik en Tri-Staple™ 2.0 intelligente vullingen

Vrijwillige terugroepactie

Juni 2019

Medtronic referentie: FA868

Geachte medisch specialist,

Deze brief dient om u te informeren dat Medtronic specifieke productiepartijen van Endo GIA™-vullingen voor chirurgische stapling voor eenmalig gebruik en Tri-Staple™ 2.0 intelligente vullingen vrijwillig terugroept.

Beschrijving van het probleem:

We voeren deze vrijwillige terugroepactie uit omdat er in het instrument mogelijk één of twee pinonderdelen ontbreken die zorgen voor de uitlijning van de klemdelen van het instrument. De betrokken vullingen zijn tussen april 2014 en april 2019 gedistribueerd. Als u een product zonder deze pinonderdelen gebruikt, kan dit resulteren in een onvolledige staplevorming, wat kan leiden tot bloedingen, anastomoselek, buikvliesontsteking of pneumothorax. Dit kan een mogelijke infectie en/of sepsis als gevolg hebben. Het mogelijke probleem is in de fabriek ontdekt tijdens kwaliteitstesten bij de productie faciliteit. Er zijn verbeteringen aan het productieproces aangebracht om dit probleem te verhelpen. Er zijn geen bevestigde klachten ontvangen in verband met dit probleem.

Deze vrijwillige terugroepactie is alleen van toepassing op de productcodes en lotnummers die worden vermeld in bijlage A.

Vereiste acties:

1. Plaats producten met de productcodes en lotnummers uit bijlage A onmiddellijk in quarantaine en stop het gebruik ervan.
2. Stuur het getroffen product als volgt terug: Alle ongebruikte producten met de getroffen productcodes en lotnummers moeten worden geretourneerd.
3. Als u de in Bijlage A vermelde Endo GIA™-vullingen voor chirurgische stapling voor eenmalig gebruik en Tri-Staple™ 2.0 intelligente vullingen aan anderen hebt overgedragen, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk een kopie van deze brief naar de ontvangers door te sturen.
4. Vul het verificatieformulier voor retournering in, ook wanneer u geen van de getroffen producten op voorraad hebt.

	Klant met voorraad	Klant zonder voorraad	Stuur het ingevulde formulier naar
Rechtstreeks bij Medtronic aangeschaft	Vul het bijgevoegde verificatieformulier voor retourproducten in zijn geheel in. Na ontvangst van uw formulier neemt de klantenservice van Medtronic contact met u op om de retourzending van uw producten te regelen. U ontvangt een tegoed voor geretourneerde ongebruikte producten.	Vul het formulier in en kruis het vakje 'geen voorraad' aan.	E-mail of fax het ingevulde formulier naar de Medtronic-contactpersoon die op het verificatieformulier staat vermeld.
Aangeschaft via een distributeur	Vul alle velden op het formulier in en neem rechtstreeks contact op met de distributeur om de retourzending van producten te regelen.	Vul het formulier in en kruis het vakje 'geen voorraad' aan.	E-mail of fax het ingevulde formulier naar de distributeur en naar de Medtronic-contactpersoon die op het verificatieformulier staat vermeld.

Dezekennisgeving moet worden doorgegeven aan iedereen dieer binnen uw organisatieop de hoogte van moet zijn of aan elke organisatie waaraan de mogelijk getroffen producten zijn overgedragen.

De bevoegde autoriteit in uw land is op de hoogte gebracht van deze actie. Bewaar een exemplaar van deze kennisgeving voor uw administratie.

Wij streven ernaar u te allen tijde optimaal te informeren over de veiligheid en prestaties van onze producten, waarbij gebruikers- en patiëntveiligheid voorop staat. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en zullen u alle nodige ondersteuning bieden. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit probleem mogelijk veroorzaakt.

Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw contactpersoon of met Medtronic Trading NL B.V. op telefoonnummer: 040-7117555.

Hoogachtend,

.....

LET'S TAKE HEALTHCARE
FURTHER, TOGETHER

Bijlage A: Lijst van betrokken producten

Item	Description	Affected Lot					
EGIA30AMT	Endo GIA™ 30 mm Articulating Medium/Thick Reload with Tri-Staple™ Technology	N5A0871KX	N7A0527KX	N7E0441KX	N8J0039KX	N8J0527KX	N8J0820KX
EGIA45CTAMT	Endo GIA™ 45 mm Curved Tip Articulating Medium/Thick Reload with Tri-Staple™ Technology	N8L0401KY					
EGIA60AXT	Endo GIA™ 60 mm Extra Thick Black Articulating Reload with Tri-Staple™ Technology	N6B0079KX	N8A0029KX				
EGIA60CTAMT	Endo GIA™ 60 mm Curved Tip Articulating Medium/Thick Reload with Tri-Staple™ Technology	N8L0311KY	N8M0063KY				
SIG30AMT	Tri-Staple™ 2.0 Intelligent Reload for use with Signia™ stapling system 30 mm Medium/Thick	N6E0033UX	N7A0018UX	N7C0238X	N8A0188X	N8E0092X	N8F0819X
		N6H0772UX	N6L0687UX	N7C0470X	N8B0483X	N8E0516X	N8J0440X
		N6H0768UX	N7A0213UX	N7E0496X	N8B0057X	N8E0213X	N8L0589Y
		N6K0522UX	N7A0401UX	N7E1088X	N8B0940X	N8E1178X	N8M0529Y
		N6K0521UX	N6M0399UX	N7F0670X	N8D0649X	N8F0483X	N9A0427Y
		N6K0667UX	N7A0837UX	N7H0962X	N8D0365X	N8F0974X	N9A0050Y
SIG45AXT	Tri-Staple™ 2.0 Black Intelligent Reload for use with Signia™ stapling system 45 mm Extra Thick	N6E0278UX	N6F0142UX	N6F0340UX	N6G0035UX	N6J0436UX	N6K1110UX
		N6E0176UX	N6F0144UX	N6F0436UX	N6G0036UX	N6K0010UX	N7C0499X
		N6E0584UX	N6F0342UX	N6G0037UX	N6E0587UX	N6K0372UX	N7C0111X
		N6E0589UX	N6F0343UX	N6G0038UX	N6G0125UX	N6K0415UX	N7C0611X
		N6E0590UX	N6F0141UX	N6G0033UX	N6G0744UX	N6K0991UX	N7D0303X
		N6E0975UX	N6F0143UX	N6G0034UX	N6H0757UX	N6K0990UX	N7C0381X
SIG45CTAMT	Tri-Staple™ 2.0 Curved Tip Intelligent Reload for use with Signia™ stapling system 45 mm Medium/Thick	N6E0296UX	N6L0721UX	N7F1125X	N7M0203X	N8C0854X	N8E1009X
		N6J1035UX	N7A0414UX	N7A0844UX	N7M0759X	N8D0508X	N8E1028X
		N6J1036UX	N7B0401UX	N7H0540X	N8A0152X	N8D1062X	N8J0178X
		N6J1034UX	N7C0194X	N7H1065X	N8A0977X	N8E0561X	N8M0424Y
		N6L0007UX	N7E0781X	N7K0033X	N8A0404X	N8E0932X	N8M0530Y
		N6L0365UX	N7F0551X	N7K0564X	N8B0943X	N8E0989X	N8M0531Y
SIG60AXT	Tri-Staple™ 2.0 Black Intelligent Reload for use with Signia™ stapling system 60 mm Extra Thick	N6C0533UX	N6E0977UX	N6E0976UX	N6G0784UX	N6H0302UX	N6K0970UX
		N6C0582UX	N6F0508UX	N6F0049UX	N6G0785UX	N6H0734UX	N6K1067UX
		N6C0657UX	N6F0509UX	N6F0503UX	N6G0786UX	N6H0693UX	N6L0152UX
		N6C0681UX	N6F0758UX	N6F0504UX	N6H0105UX	N6H0909UX	N6M0328UX
		N6E0115UX	N6F0295UX	N6F0505UX	N6H0106UX	N6H0946UX	N7A0170UX
		N6E0116UX	N6F0748UX	N6E0979UX	N6H0107UX	N6G0068UX	N7C0475X
		N6E0978UX	N6F0759UX	N6F0507UX	N6H0173UX	N6J0092UX	N7C1091X
		N6F0045UX	N6F0760UX	N6F0506UX	N6H0298UX	N6J0040UX	N7C1092X
		N6F0046UX	N6F0786UX	N6G0270UX	N6H0299UX	N6G0486UX	N7D0104X
		N6F0047UX	N6F0787UX	N6G0271UX	N6H0155UX	N6H0174UX	N8A0087X
		N6F0048UX	N6F0788UX	N6G0287UX	N6H0156UX	N6K0302UX	N8D0035X
N6F0050UX	N6G0288UX	N6G0499UX	N6H0157UX	N6H0522UX	N8D0225X		
SIG60CTAMT	Tri-Staple™ 2.0 Curved Tip Intelligent Reload for use with Signia™ stapling system 60 mm Medium/Thick	N6E0295UX	N7A0415UX	N7H0047X	N8A0655X	N8E0015X	N8K0823KY
		N6H0576UX	N7C0112X	N7G0444X	N8B0455X	N8D0907X	N8M0845Y
		N6J1092UX	N7D1013X	N7H1067X	N8B0945X	N8G0648X	N8L0166Y
		N6K0230UX	N7E1089X	N7J0175X	N8C1213X	N8J0764X	N9A0204Y
		N6K0938UX	N7F0275X	N7L0825X	N8C0757X	N8K0840Y	N9B0455Y
		N6L0777UX	N7F1126X	N8A0249X	N8D0593X	N8L0436Y	N6L0422URX
	N6M0607UX						

Bijlage A: Lijst van betrokken producten

Item	Description	Affected Lot Numbers					
EGIA45AMT	Endo GIA™ 45 mm Articulating Medium/Thick Reload with Tri-Staple™ Technology	N7L1098KX	N5M0172KX	N6M0095KX	N7G0790KX	N7L0132KX	N8D0483KX
		N7M0592KX	N5M0693KX	N6M0113KX	N7H0012KX	N7L0856KX	N8D0594KX
		N8A0203KX	N5M0662KX	N6M0263KX	N7H0347KX	N7L1004KX	N8D0647KX
		N4D0338KX	N5M0732KX	N7A0293KX	N7G0904KX	N7L0475KX	N8D0311KX
		N4D0328KX	N5M0741KX	N7A0792KX	N7H0174KX	N7K1181KX	N8D0536KX
		N4E0846KX	N6A0913KX	N7B0125KX	N7H0470KX	N7K1183KX	N8D0694KX
		N4E0796KX	N6B0332KX	N7B0154KX	N7H0569KX	N7L0811KX	N8D0482KX
		N4E1018KX	N6C0462KX	N7B0177KX	N7H0520KX	N7M0100KX	N8E0435KX
		N4E1059KX	N6D0388KX	N7B0070KX	N7H0315KX	N7M0132KX	N8E0431KX
		N4E0980KX	N6E0078KX	N7B0946KX	N7H0419KX	N7M0506KX	N8E0498KX
		N4E1654KX	N6E0099KX	N7B0905KX	N7H1017KX	N7M0554KX	N8E0659KX
		N4E1173KX	N6E0129KX	N7B0885KX	N7H1057KX	N7M0778KX	N8E0725KX
		N4E1655KX	N6E0366KX	N7C0387KX	N7H1096KX	N7M0589KX	N8E0567KX
		N4E1269KX	N6E0416KX	N7C0442KX	N7H1141KX	N7M0620KX	N8D1045KX
		N4G0523KX	N6D0506KX	N7C0517KX	N7H1187KX	N7M0918KX	N8E0612KX
		N4H0078KX	N6D0474KX	N7C0405KX	N7J0070KX	N7M0614KX	N8E0700KX
		N4G1541KX	N6F0039KX	N7C0775KX	N7J0099KX	N7M1000KX	N8E0149KX
		N4J0215KX	N6F0088KX	N7C0812KX	N7H0957KX	N7K0904KX	N8E0201KX
		N4J0250KX	N6F0156KX	N7C0899KX	N7J0135KX	N7M0967KX	N8D1067KX
		N4J0271KX	N6F0720KX	N7C0857KX	N7J0174KX	N8A0380KX	N8F0094KX
		N4J1002KX	N6F0780KX	N7C0927KX	N7H0712KX	N8A0381KX	N8F0307KX
		N4J1247KX	N6F0816KX	N7C0977KX	N7H1175KX	N8A0772KX	N8F0183KX
		N4J1217KX	N6G0243KX	N7D0135KX	N7J0483KX	N8A0960KX	N8F0258KX
		N4K1465KX	N6G0280KX	N7D0247KX	N7H0786KX	N8A1028KX	N8F0335KX
		N4M0921KX	N6G0198KX	N7C0485KX	N7J0550KX	N8A1050KX	N8F0347KX
		N5B0340KX	N6G0139KX	N7D0101KX	N7J0508KX	N8A0065KX	N8F0383KX
		N5B0417KX	N6G0191KX	N7C1014KX	N7J0692KX	N8A1119KX	N8F0482KX
		N5B0484KX	N6G0213KX	N7D0182KX	N7J0858KX	N8B0204KX	N8B1048KX
		N5B0285KX	N6G0099KX	N7D0226KX	N7J0636KX	N8A1099KX	N8F0428KX
		N5B0680KX	N6H0168KX	N7D0264KX	N7J0897KX	N8B0114KX	N8D0394KX
		N5D0467KX	N6H0291KX	N7D0495KX	N7J1014KX	N8B0137KX	N8E0233KX
		N5D0497KX	N6H0327KX	N7D0416KX	N7K0270KX	N8B0571KX	N8E0266KX
		N5D0550KX	N6H0370KX	N7D0538KX	N7K0307KX	N8B0666KX	N8F0691KX
		N5D0609KX	N6H0433KX	N7D0591KX	N7J1155KX	N8B0805KX	N8F0773KX
		N5D0660KX	N6H0466KX	N7D0918KX	N7K0225KX	N8B0885KX	N8E0378KX
		N5D0736KX	N6E0117KX	N7D0473KX	N7K0500KX	N8B0641KX	N8F0658KX
		N5D0765KX	N6H0247KX	N7D0945KX	N7K0008KX	N8B0709KX	N8F0858KX
		N5D1008KX	N6H0456KX	N7E0372KX	N7K0085KX	N8C0159KX	N8F0879KX
		N5E0068KX	N6H0827KX	N7E0518KX	N7K0154KX	N8B0849KX	N8F1015KX
		N5E0143KX	N6H0792KX	N7E0565KX	N7K0272KX	N8B1009KX	N8F0976KX
		N5E0297KX	N6J0152KX	N7E0610KX	N7K0303KX	N8B1034KX	N8E0321KX
		N5E0727KX	N6J0185KX	N7E0920KX	N7K0400KX	N8B0769KX	N8E0699KX
		N5E0756KX	N6J0243KX	N7E0962KX	N7K0443KX	N8B0958KX	N8F1046KX
		N5F0096KX	N6J0476KX	N7F0093KX	N7K0544KX	N8C0324KX	N8E0081KX
		N5F1223KX	N6K0209KX	N7F0186KX	N7K0956KX	N8C0340KX	N8G0871KX
		N5F1382KX	N6K0676KX	N7F0094KX	N7K0562KX	N8C0470KX	N8G0942KX
		N5G0414KX	N6K0739KX	N7F0663KX	N7K0711KX	N8C0546KX	N8F0921KX
		N5G0329KX	N6K0774KX	N7F0696KX	N7K0742KX	N8C0718KX	N8G0911KX
		N5G0355KX	N6K0824KX	N7F0745KX	N7K0783KX	N8B0905KX	N8H0735KX
		N5G0868KX	N6K0251KX	N7F0224KX	N7K0087KX	N8C0589KX	N8H0759KX
		N5G0244KX	N6K0871KX	N7F1052KX	N7K0821KX	N8C0779KX	N8H0683KX
		N5G0339KX	N6K0293KX	N7F1139KX	N7L0057KX	N8C0777KX	N8G0980KX
N5G0405KX	N6K1137KX	N7G0016KX	N7L0091KX	N8C0816KX	N8J0819KX		
N5G0809KX	N6K0160KX	N7F0662KX	N7L0403KX	N8C1338KX	N8L0895KY		
N5J1153KX	N6L0909KX	N7G0241KX	N7K1052KX	N8D0083KX	N9B0348KY		
N5J1201KX	N6L0942KX	N7G0279KX	N7L0431KX	N8C1339KX	N6L0814KRX		
N5K0045KX	N6M0065KX	N7F1019KX	N7L0592KX	N8D0043KX	N8M0168KRY		
N5K0089KX	N6M0134KX	N7F0822KX	N7K1150KX	N8D0142KX	N9A0665KRY		
N5K0115KX	N6L0806KX	N7G0498KX	N7L0361KX	N8D0312KX	N9A0954KRY		
N5J1233KX	N6L0944KX						

Bijlage A: Lijst van betrokken producten

Item	Description	Affected Lot Numbers					
EGIA60AMT	Endo GIA™ 60 mm Articulating Medium/Thick Reload with Tri-Staple™ Technology	N4C1545KX	N5J0532KX	N6D0903KX	N7F0868KX	N8G0752KX	N8L0327KY
		N4D0042KX	N5J0658KX	N6D0924KX	N7F0923KX	N8G0839KX	N8L0440KY
		N4C1718KX	N5J0816KX	N6E0002KX	N7F0589KX	N8G0879KX	N8L0163KY
		N4D0366KX	N5H0100KX	N6E0244KX	N7F0903KX	N8G0880KX	N8L0204KY
		N4D0453KX	N5H0481KX	N6E0287KX	N7F0964KX	N8G1025KX	N8L0351KY
		N4D0589KX	N5J0418KX	N6E0335KX	N7G0062KX	N8H0016KX	N8K1023KY
		N4D0605KX	N5J0572KX	N6D0607KX	N7G0209KX	N8H0089KX	N8L0099KY
		N4D0688KX	N5J0694KX	N6D0285KX	N7F0961KX	N8H0135KX	N8L0368KY
		N4D0814KX	N5J0966KX	N6D0536KX	N7G0246KX	N8G0217KX	N8L0471KY
		N4D0897KX	N5J0775KX	N6D0580KX	N7G0287KX	N8H0372KX	N8L0594KY
		N4D1145KX	N5J1099KX	N6D0160KX	N7G0689KX	N8G0936KX	N8L0534KY
		N4E1383KX	N5J1130KX	N6D0180KX	N7G0723KX	N8H0159KX	N8L0765KY
		N4E1505KX	N5H0970KX	N6D0230KX	N7G0775KX	N8F1045KX	N8L0527KY
		N4F0006KX	N5K0139KX	N6D0283KX	N7G0661KX	N8G0983KX	N8L0570KY
		N4F0076KX	N5K0208KX	N6D0334KX	N7H0396KX	N8H0175KX	N8L0733KY
		N4F0114KX	N5K0308KX	N6D0376KX	N7H0493KX	N8H0220KX	N8L0633KY
		N4F0516KX	N5K0374KX	N6D0672KX	N7H0102KX	N8H0298KX	N8M0004KY
		N4F0853KX	N5K0412KX	N6E0068KX	N7H0762KX	N8H0332KX	N8L0715KY
		N4F0719KX	N5K0429KX	N6E0573KX	N7H0827KX	N8H0406KX	N8L0772KY
		N4F0929KX	N5K0564KX	N6E0600KX	N7H0422KX	N8H0506KX	N8L0822KY
		N4F0695KX	N5K0629KX	N6E0691KX	N7H0464KX	N8H0600KX	N8M0026KY
		N4F0981KX	N5K0665KX	N6E0652KX	N7H0716KX	N8H0613KX	N8M0035KY
		N4F1092KX	N5K0700KX	N6F0165KX	N7H0867KX	N8H0868KX	N8L0073KY
		N4F1331KX	N5K0732KX	N6F0232KX	N7J0254KX	N8H0434KX	N8M0064KY
		N4F1450KX	N5K0848KX	N6F0279KX	N7J0371KX	N8H0474KX	N8M0100KY
		N4F1163KX	N5K0895KX	N6B0081KX	N7J0420KX	N8H0776KX	N8M0178KY
		N4F1542KX	N5K0941KX	N6E0462KX	N7J0454KX	N8H0574KX	N8M0140KY
		N4F1159KX	N5K0775KX	N6F0307KX	N7J0214KX	N8H0606KX	N8M0243KY
		N4F1383KX	N5K0992KX	N6F0385KX	N7J0286KX	N8H0652KX	N8L0673KY
		N4H0432KX	N5K1054KX	N6F0087KX	N7J0845KX	N8H0750KX	N8M0217KY
		N4H0475KX	N5K0595KX	N6F0442KX	N7J0386KX	N8H0800KX	N8M0262KY
		N4H0503KX	N5L0595KX	N6F0397KX	N7J0748KX	N8H0969KX	N8M0276KY
		N4J1170KX	N5M0150KX	N6F0474KX	N7J0792KX	N8H0653KX	N8M0351KY
		N4K0742KX	N5L0809KX	N6F0512KX	N7J0884KX	N8J0221KX	N8M0439KY
		N4K0835KX	N5M0088KX	N6F0541KX	N7K1119KX	N8J0030KX	N8M0459KY
		N4K0870KX	N5L0746KX	N6F0573KX	N7K1094KX	N8J0260KX	N8M0551KY
		N4K0212KX	N5M0536KX	N6C0753KX	N7L0635KX	N8H0815KX	N8M0628KY
		N4K0757KX	N5M0491KX	N6F0211KX	N7L0737KX	N8J0494KX	N8M0673KY
		N4L0249KX	N5M0582KX	N6F0611KX	N7L0738KX	N8J0188KX	N8M0512KY
		N4L0315KX	N5M0769KX	N6F0656KX	N7M0072KX	N8J0319KX	N8M0699KY
		N4M1062KX	N5M0827KX	N6F0659KX	N7L0894KX	N8J0443KX	N8M0621KY
		N4M0982KX	N5M0459KX	N6F0705KX	N7M0322KX	N8J0301KX	N8M0394KY
		N5A0364KX	N5M0632KX	N6F0935KX	N7L0957KX	N8J0414KX	N8M0588KY
		N5A0345KX	N6A0004KX	N6J0202KX	N7M0323KX	N8J0564KX	N8M0713KY
		N5A0286KX	N6A0034KX	N6J0314KX	N7M0864KX	N8J0617KX	N8M0793KY
		N5A1461KX	N6A0086KX	N6J0364KX	N7M0785KX	N8J0686KX	N8M0796KY
		N5B0700KX	N6A0124KX	N6K0742KX	N8A0098KX	N8J0762KX	N8M0763KY
		N5B0757KX	N6A0520KX	N6L0523KX	N8A0744KX	N8H0894KX	N9A0013KY
		N5B0031KX	N6A0527KX	N6L0634KX	N8A0882KX	N8J0060KX	N9A0092KY
		N5B0794KX	N6A0428KX	N6L0946KX	N8A0818KX	N8J0313KX	N9A0171KY
N5B0856KX	N6B0052KX	N6L0527KX	N8A0911KX	N8J0523KX	N8M0849KY		

Bijlage A: Lijst van betrokken producten

Item	Description	Affected Lot Numbers					
EGIA60AMT	Endo GIA™ 60 mm Articulating Medium/Thick Reload with Tri-Staple™ Technology	N5C0465KX	N6B0028KX	N6L0556KX	N8A1044KX	N8J0534KX	N9A0139KY
		N5C0639KX	N6B0135KX	N6M0737KX	N8B0372KX	N8J0810KX	N9A0329KY
		N5C0725KX	N6B0105KX	N6M0329KX	N8B0411KX	N8J0102KX	N9A0151KY
		N5C0986KX	N6B0177KX	N6M0556KX	N8B0458KX	N8J0882KX	N8M0711KY
		N5C0668KX	N6B0270KX	N6M0698KX	N8B0311KX	N8J0952KX	N9A0358KY
		N5C0914KX	N6B0219KX	N7A0131KX	N8A0819KX	N8J0787KX	N9A0460KY
		N5E0348KX	N6B0323KX	N7A0167KX	N8B0497KX	N8J1064KX	N9A0497KY
		N5D0862KX	N6B0386KX	N7A0208KX	N8C0112KX	N8J1019KX	N9A0423KY
		N5F0181KX	N6B0477KX	N6M0729KX	N8B0553KX	N8J0723KX	N8M0820KY
		N5F0330KX	N6B0405KX	N7A0227KX	N8C0638KX	N8J0852KX	N9A0366KY
		N5E1158KX	N6B0504KX	N7A0086KX	N8D0183KX	N8H0940KX	N9A0400KY
		N5E1245KX	N6B0541KX	N7A0941KX	N8D0226KX	N8J0005KX	N9A0186KY
		N5F0260KX	N6B0624KX	N7B0024KX	N8D0242KX	N8J0990KX	N9A0267KY
		N5F0348KX	N6B0722KX	N7B0123KX	N8D0314KX	N8J1070KX	N9A0544KY
		N5C0758KRX	N6B0746KX	N7B0345KX	N8E1013KX	N8K0016KX	N9A0636KY
		N5E1213KX	N6B0788KX	N7B0591KX	N8E1175KX	N8K0081KX	N9A0652KY
		N5G0114KX	N6B0852KX	N7B0739KX	N8E1177KX	N8K0110KX	N9A0765KY
		N5G0154KX	N6B0923KX	N7C0332KX	N8E0676KX	N8K0180KX	N9A0725KY
		N5G0186KX	N6A0253KX	N7C0275KX	N8E0687KX	N8K0212KX	N9A0787KY
		N5G0877KX	N6A0255KX	N7C0371KX	N8E1135KX	N8K0231KX	N8L0853KY
		N5G0983KX	N6C0398KX	N7C0833KX	N8F0098KX	N8K0319KX	N9A0618KY
		N5G1011KX	N6C0355KX	N7C0959KX	N8E0814KX	N8K0136KX	N9A0812KY
		N5G1122KX	N6C0369KX	N7C0756KX	N8F0581KX	N8K0361KX	N9A0827KY
		N5G0660KX	N6C0370KX	N7C0799KX	N8F0523KX	N8K0452KX	N9A0880KY
		N5G1147KX	N6C0524KX	N7D0453KX	N8G0035KX	N8K0393KX	N9A0937KY
		N5G1248KX	N6C0589KX	N7E0043KX	N8G0067KX	N8K0492KX	N9A0521KY
		N5H0250KX	N6C0562KX	N7E0148KX	N8E1060KX	N8K0254KX	N9A0696KY
		N5H0623KX	N6C0509KX	N7D0592KX	N8G0179KX	N8K0584KX	N9B0020KY
		N5H0676KX	N6C0598KX	N7D0632KX	N8F1111KX	N8K0762KY	N9B0049KY
		N5H0226KX	N6C0678KX	N7D0690KX	N8G0244KX	N8K0632KX	N9B0220KY
		N5H0730KX	N6C0701KX	N7E0223KX	N8G0122KX	N8K0421KX	N9B0122KY
		N5H0838KX	N6C0737KX	N7D0908KX	N8G0284KX	N8K0697KY	N9B0084KY
		N5H0949KX	N6C0800KX	N7E0304KX	N8F0619KX	N8K0709KY	N9B0299KY
		N5H1013KX	N6C0841KX	N7D0744KX	N8G0566KX	N8K0898KY	N9B0522KY
		N5H1082KX	N6C0889KX	N7D0949KX	N8G0624KX	N8K0939KY	N9B0066KY
		N5H1111KX	N6C0913KX	N7E0109KX	N8E0633KX	N8K0842KY	N9B0298KY
		N5H1158KX	N6C0938KX	N7E0188KX	N8G0202KX	N8K0437KX	N9B0201KY
		N5H1186KX	N6C0972KX	N7E0726KX	N8G0388KX	N8K0800KY	N9B0389KY
		N5H0993KX	N6D0009KX	N7E0806KX	N8G0440KX	N8K0971KY	N9B0570KY
		N5J0220KX	N6D0051KX	N7E0605KX	N8G0351KX	N8K0996KY	N9B0490KY
		N5J0266KX	N6D0070KX	N7F0157KX	N8G0468KX	N8K1063KY	N9B0540KY
		N5J0295KX	N6D0091KX	N7F0307KX	N8G0489KX	N8L0016KY	N9B0722KY
		N5J0321KX	N6D0715KX	N7F0173KX	N8G0513KX	N8L0072KY	N9B0403KY
N5H0762KX	N6D0735KX	N7E0990KX	N8G0688KX	N8K0531KX	N9C0450KY		
N5J0492KX	N6D0757KX	N7F0370KX	N8G0780KX	N8K0983KY	N5L0673KRX		
N5H1216KX	N6D0796KX	N7F0500KX	N8G0550KX	N8L0234KY	N9A0773KRY		
N5J0512KX	N6D0830KX	N7F0061KX	N8G0697KX	N8L0283KY			

Bijlage A: Lijst van betrokken producten in BOX/KIT

Material Description	Serial No
BOX PST02995 GASTRIC BYPASS BOX	214137243
BOX PST02995 GASTRIC BYPASS BOX	214806852
BOX PST02995 GASTRIC BYPASS BOX	214895366
BOX PST02995 GASTRIC BYPASS BOX	214982071
BOX PST02995 GASTRIC BYPASS BOX	214982070
BOX PST02995 GASTRIC BYPASS BOX	215044034
BOX PST02995 GASTRIC BYPASS BOX	215044035
BOX PST02995 GASTRIC BYPASS BOX	215102327
BOX PST02995 GASTRIC BYPASS BOX	215102328
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215094769
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215094767
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215094766
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215094768
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	215178804
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	215178804
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	215178804
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	215178805
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215201095
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215255953
BOX PST04116 GBP ZONDER LHOOK	215301524
BOX PST04116 GBP ZONDER LHOOK	215301523
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215541707
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215541706
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215541705
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215541704
BOX PST04410 NAAD BOX	215602869
BOX PST04410 NAAD BOX	215608669
BOX PST04390 LAP OES STD BOX HALS THORAX	215602867
BOX PST04390 LAP OES STD BOX HALS THORAX	215608667
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215658533
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215658534
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215658535
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215658536
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215770661
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215770200
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215770663
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215770200
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215770200
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215770661

Bijlage A: Lijst van betrokken producten in BOX/KIT

Material Description	Serial No
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215770663
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215770661
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215770662
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215770662
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215770662
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	215846439
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	215846438
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215848473
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215848472
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215848471
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	215879928
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	215899335
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	215899334
BOX PST04410 NAAD BOX	216120909
BOX PST04390 LAP OES STD BOX HALS THORAX	216120908
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	216163004
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	216163005
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	216163006
BOX PST03978 GASTRIC BYPASS LHOOK	216163007
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216255761
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216219769
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216255761
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216255762
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216171417
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216171418
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216171419
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216171420
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216293974
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216293973
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216321425
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216321426
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216321427
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216293976
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216293975
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216353919
BOX PST04410 NAAD BOX	216432311
BOX PST04390 LAP OES STD BOX HALS THORAX	216432310
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216388126
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216388127

Bijlage A: Lijst van betrokken producten in BOX/KIT

Material Description	Serial No
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216388128
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216388129
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216388130
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216388131
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216464735
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216464734
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216464735
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216464733
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216464738
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216464737
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216464738
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216464738
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216464739
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216464736
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	216520257
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	216520256
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	216520255
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216652661
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216652399
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216652400
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216652397
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216652398
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216740338
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216740337
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216740336
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216740335
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216671972
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216671971
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216671969
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216671970
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216740339
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216740340
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216740341
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216872732
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216872731
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216872734
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216872730
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216872735
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216872733
BOX PST226922602 SLEEVE PROCEDURE BOX	216872729

Bijlage A: Lijst van betrokken producten in BOX/KIT

Material Description	Serial No
BOX PST226922602 SLEEVE PROCEDURE BOX	216872728
BOX PST04410 NAAD BOX	216951258
BOX PST226922602 SLEEVE PROCEDURE BOX	216965406
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216953575
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216965407
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216965408
BOX PST496535277 WEST SLEEVE PROCEDURE	216951612
BOX PST496535277 WEST SLEEVE PROCEDURE	216951613
BOX PST496535277 WEST SLEEVE PROCEDURE	216951614
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216953579
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216953578
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216953577
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216953576
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216974657
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216974659
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216974658
BOX PST226922602 SLEEVE PROCEDURE BOX	216974656
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	217039491
BOX PST226922602 SLEEVE PROCEDURE BOX	217062008
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	217062010
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	217062009
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	217063588
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217063895
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217063894
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217063893
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217063892
BOX PST04390 LAP OES STD BOX HALS THORAX	217068592
BOX PST04410 NAAD BOX	217076266
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	217132679
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	217132680
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	217132681
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	217132740
BOX PST226922602 SLEEVE PROCEDURE BOX	217148836
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	217148838
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	217148839
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	217132741
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	217132740
BOX PST496535277 WEST SLEEVE PROCEDURE	217163764
BOX PST496535277 WEST SLEEVE PROCEDURE	217163763
BOX PST496535277 WEST SLEEVE PROCEDURE	217163762

Bijlage A: Lijst van betrokken producten in BOX/KIT

Material Description	Serial No
BOX PST496535277 WEST SLEEVE PROCEDURE	217163761
BOX PST04390 LAP OES STD BOX HALS THORAX	217132961
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217172734
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217172733
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217172735
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217172736
BOX PST04410 NAAD BOX	217211109
BOX PST496535277 WEST SLEEVE PROCEDURE	217279235
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217271077
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217271076
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217271074
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217271075
BOX PST04353 OPENTRISTAPLEGE	217277165
BOX PST04353 OPENTRISTAPLEGE	217290226
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217334814
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217334815
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217334816
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	217334817
BOX PST04390 LAP OES STD BOX HALS THORAX	217338487
BOX PST04390 LAP OES STD BOX HALS THORAX	216026451
BOX PST04390 LAP OES STD BOX HALS THORAX	216026451
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216255762
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216255762
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216219770
BOX PST04132 SLEEVE PROCED	216219770
BOX PST226922602 SLEEVE PROCEDURE BOX	216769425
BOX PST226922602 SLEEVE PROCEDURE BOX	216769425
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769436
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769430
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769430
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769431
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769431
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769432
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769432
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769433
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769433
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769435
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769435
BOX PST222024254 GASTRIC BYPASS PROCEDUR	216769436
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905329

Bijlage A: Lijst van betrokken producten in BOX/KIT

Material Description	Serial No
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905329
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905330
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905331
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905328
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905328
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905332
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905332
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905331
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905330
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	216520255
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	216520257
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	217132740
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	216520256
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	217132740
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	216520257
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	216520255
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	216520256
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	217132741
BOX PST724243377 ENDOMETRIOSE LAR	217132741
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905328
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905329
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905330
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905331
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905331
BOX PST044395014 GASTRIC BYPASS	216905332

Een betrokken product herkennen



Itemcode

Partijnummer



Itemcode

Partijnummer

Hoofdcode

ORDER NO: 19936878		67090146		KIT PARENT: 0022199	
NAME: MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSP					
Qty	Code	Description	Qty	Code	Description
1	EGIA45MT	EGIA PRACTICAL MED THK RELOAD			
1	EGIA45XT	EGIA 4 HANDLE STANDARD			

