



## URGENTE VEILIGHEIDSMEDEDELING

GE Healthcare

3000 N. Grandview Blvd. - W440  
Waukesha, WI 53188  
USA

GE Healthcare ref.: FMI 36141

20 november 2019

Aan: Ziekenhuisbeheerder/Risicomanager  
Teamleider Verpleging  
Directeur biomedische technologie

Betreft: Uitval van een O<sub>2</sub>-sensor in de CARESCAPE ademhalingsmodules (E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE), de luchtweggasoptie (N-CAiO) en hun respectievelijke service exchange units met specifieke serienummers geïnstalleerd of gerepareerd vanaf juni 2019.

***Dit document bevat belangrijke informatie voor uw product. Zorg ervoor dat alle mogelijke gebruikers in uw instelling op de hoogte worden gesteld van dit veiligheidsbericht en de aanbevolen acties.  
Bewaar dit document voor uw administratie.***

**Veiligheids-Kwestie** De weergegeven End Tidal Oxygen (EtO<sub>2</sub>) en Fraction of Inspired Oxygen (FiO<sub>2</sub>) -waarden kunnen onjuist zijn waardoor een meetfout tot 50% in de EtO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub>-waarden op kan treden. Dit probleem kan optreden in de O<sub>2</sub>-sensor van de CARESCAPE ademhalingsmodules en luchtweggasopties. Een onjuiste EtO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub>-waarde zou kunnen leiden tot een mogelijke hypoxische of hyperoxische meetwaarde waardoor een foutieve klinische besluitvorming tot stand kan komen. Er zijn geen letsels als gevolg van dit probleem gerapporteerd.

**Opmerking:** De gemeten waarde wijzigt de instelling voor zuurstoffractie of de door de clinicus gekozen flow niet.


**Veiligheids-Instructies** Vervang de betrokken ademhalingsmodule door een andere module die niet getroffen is door dit probleem. Als u geen vervangende module heeft, zorg er dan voor dat de O<sub>2</sub>-aflezing van uw ademhalingsmodule zich binnen de specificaties bevindt door de onderstaande instructies te volgen (a) voordat er een nieuw patiëntcasus wordt gestart en (b) minimaal één keer per dag bij een langdurige patiëntcasus:

- 1) Sluit de module aan op het host-apparaat;
- 2) Zorg ervoor dat de module volledig is opgewarmd door hem minimaal 20 minuten van tevoren aan te zetten;
- 3) Configureer de O<sub>2</sub>-aflezing op het scherm van het host-apparaat zoals vermeld in de instructies van het host-apparaat;
- 4) Voer een 100% O<sub>2</sub>-gasstroom van de ventilator naar de module en observeer de O<sub>2</sub>-aflezing; en
- 5) Zorg ervoor dat de O<sub>2</sub>-aflezing zich binnen de specificaties, 100% ±3%, bevindt en dat er geen afwijkend gedrag in de golfvorm wordt vertoond.
- 6) Als u de bovenstaande stappen niet succesvol kunt afronden, moet de module uit gebruik worden genomen. Neem contact op met GE Healthcare Service of uw lokale servicevertegenwoordiger.

**Details Betrokken Product** CARESCAPE ademhalingsmodules, de luchtweggasoptie en hun respectievelijke service exchange units, geïnstalleerd of gerepareerd vanaf juni 2019.

Product	GTIN
CARESCAPE ademhalingsmodule E-sCO	00840682104173
CARESCAPE ademhalingsmodule E-sCOV	00840682104258
CARESCAPE ademhalingsmodule E-sCOVX	00840682104289
CARESCAPE ademhalingsmodule E-sCAiO	00840682104180
CARESCAPE ademhalingsmodule E-sCAiOV	00840682104142
CARESCAPE ademhalingsmodule E-sCAiOVX	00840682104067
CARESCAPE ademhalingsmodule E-sCAiOE	00840682104135
CARESCAPE ademhalingsmodule E-sCAiOVE	00840682104302
Luchtweggasoptie N-CAiO	00840682104074

Zie Bijlage A voor een lijst met betrokken serienummers. Het serienummer (SN) van de module kan worden gevonden op het typeplaatje van de module, zoals hieronder afgebeeld. Het typeplaatje bevindt zich aan de zijkant van de module.

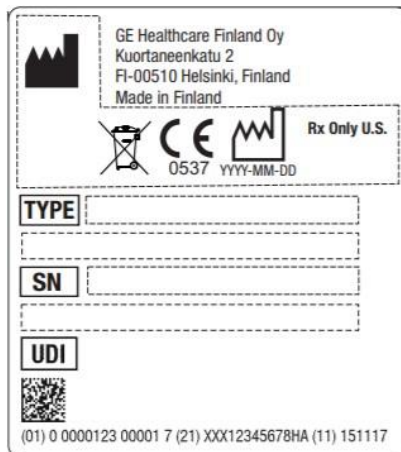

De betrokken exchange units zijn mogelijk vanaf juni 2019 gebruikt om de CARESCAPE ademhalingsmodules (E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE) of luchtweggasoptie (N-CAiO) te repareren.

De betrokken modules zouden in gebruik kunnen zijn met de volgende GE Healthcare host-apparaten:

- CARESCAPE ademhalingsmodules (E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE) kunnen gebruikt worden met:
  - CARESCAPE B850, B650 en B450 patiëntmonitors
  - B40(i), B105, B125 patiëntmonitors
  - Avance CS<sup>2</sup> en Aisys CS<sup>2</sup> anesthesie-zorgstation
  - Zorgstation 620, 650, 650c voor anesthesie
  - CARESCAPE R860 Ventilator voor Critical Care
  - S/5 modulaire monitors
- Luchtweggasoptie (N-CAiO) kan worden gebruikt met:
  - B40(i), B105, B125 patiëntmonitors
  - Zorgstation 620, 650, 650c voor anesthesie

**Product-Correctie**

GE Healthcare zal alle betrokken producten kosteloos voor u corrigeren. Een vertegenwoordiger van GE Healthcare zal contact met u opnemen om de correctie te regelen.

**Contact-informatie**

Indien u enige vragen heeft met betrekking tot deze correctieve actie of de identificatie van de betrokken items, neem dan contact op met uw lokale Sales/Service vertegenwoordiger.

GE Healthcare  
De Wel 18  
3871 MV Hoevelaken  
033-2541250

GE Healthcare bevestigt dat dit bericht is gemeld aan de betreffende bevoegde instantie.

Wij verzekeren u dat het behoud van een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit onze hoogste prioriteit heeft. Neem bij vragen alstublieft onmiddellijk contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

.....

Chief Medical Officer GE Healthcare

Senior Executive, Global Regulatory and Quality GE Healthcare



**BEVESTIGING KENNISGEVING MEDISCH INSTRUMENT  
ANTWOORD VEREIST**

**Vul dit formulier (deze pagina) in en retourneer het na ontvangst zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst aan GE Healthcare. Hiermee wordt de ontvangst van en inzicht in de Kennisgeving inzake correctie van medische apparatuur GEHC Ref nr. 36141 bevestigd alsmede de acties die genomen moeten worden.**

Naam klant/ontvanger: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Stad/Provincie/Postcode/Land: \_\_\_\_\_

E-mailadres: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Wij bevestigen ontvangst van en inzicht in de bijbehorende Kennisgeving inzake correctie van medische apparatuur en hebben de gepaste maatregelen in overeenstemming met die Kennisgeving genomen of zullen deze nemen.

**Geef de naam van de persoon die verantwoordelijk is en dit formulier heeft ingevuld.**

Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam in blokletters: \_\_\_\_\_

Titel: \_\_\_\_\_

Datum (DD/MM/JJJJ): \_\_\_\_\_

**Scan het ingevulde formulier of neem er een foto van en stuur dit/die per e-mail naar:**

[Recall.36141@ge.com](mailto:Recall.36141@ge.com)

**De onderstaande QR-code kan worden gebruikt om dit e-mailadres te verkrijgen:**

Scan de QR-code, hecht de foto aan de e-mail, klik op Verzenden



**BIJLAGE A**

**Lijsten met serienummers van de betrokken CARESCAPE ademhalingsmodules E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE; luchtweggasoptie N-CAiO en hun respectievelijke service exchange units en field replaceable units**

<b>CARESCAPE ademhalingsmodule E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE serienummers</b>						
SGV19240060HA	SGV19240365HA	SGV19251002HA	SGV19261013HA	SGV19264036HA	SGV19274044HA	SGV19285005HA
SGV19240073HA	SGV19240366HA	SGV19251007HA	SGV19261015HA	SGV19264037HA	SGV19274045HA	SGV19285007HA
SGV19240076HA	SGV19240371HA	SGV19251019HA	SGV19261016HA	SGV19264038HA	SGV19276001HA	SGV19285013HA
SGV19240082HA	SGV19240373HA	SGV19251020HA	SGV19261017HA	SGV19264040HA	SGV19276013HA	SGV19285015HA
SGV19240084HA	SGV19240376HA	SGV19251023HA	SGV19261019HA	SGV19264041HA	SGV19276023HA	SGV19285017HA
SGV19240085HA	SGV19240377HA	SGV19251024HA	SGV19261021HA	SGV19264043HA	SGV19276028HA	SGV19285019HA
SGV19240090HA	SGV19240381HA	SGV19251028HA	SGV19261023HA	SGV19264045HA	SGV19276029HA	SGV19290003HA
SGV19240091HA	SGV19240391HA	SGV19251033HA	SGV19261024HA	SGV19264046HA	SGV19276034HA	SGV19290010HA
SGV19240094HA	SGV19240392HA	SGV19251034HA	SGV19261025HA	SGV19264047HA	SGV19276042HA	SGV19290025HA
SGV19240095HA	SGV19240395HA	SGV19251037HA	SGV19261027HA	SGV19264048HA	SGV19280005HA	SGV19290027HA
SGV19240098HA	SGV19240398HA	SGV19251044HA	SGV19261028HA	SGV19264049HA	SGV19280006HA	SGV19290029HA
SGV19240100HA	SGV19240401HA	SGV19251045HA	SGV19261030HA	SGV19264050HA	SGV19280010HA	SGV19290030HA
SGV19240101HA	SGV19240406HA	SGV19251049HA	SGV19261031HA	SGV19264051HA	SGV19280017HA	SGV19290035HA
SGV19240103HA	SGV19240413HA	SGV19251051HA	SGV19261032HA	SGV19264056HA	SGV19280029HA	SGV19290037HA
SGV19240104HA	SGV19240416HA	SGV19251052HA	SGV19261033HA	SGV19264059HA	SGV19280074HA	SGV19290054HA
SGV19240105HA	SGV19241001HA	SGV19251055HA	SGV19261034HA	SGV19264060HA	SGV19280083HA	SGV19290060HA
SGV19240106HA	SGV19241002HA	SGV19251057HA	SGV19261077HA	SGV19266005HA	SGV19280087HA	SGV19290061HA
SGV19240108HA	SGV19241003HA	SGV19251058HA	SGV19261084HA	SGV19266006HA	SGV19280088HA	SGV19290063HA
SGV19240109HA	SGV19241005HA	SGV19251059HA	SGV19261086HA	SGV19266011HA	SGV19280094HA	SGV19290079HA
SGV19240110HA	SGV19241006HA	SGV19251060HA	SGV19261087HA	SGV19266012HA	SGV19280106HA	SGV19290092HA
SGV19240111HA	SGV19241007HA	SGV19251062HA	SGV19261088HA	SGV19266019HA	SGV19280109HA	SGV19290093HA
SGV19240112HA	SGV19241010HA	SGV19251064HA	SGV19261089HA	SGV19270004HA	SGV19280110HA	SGV19290096HA
SGV19240114HA	SGV19241011HA	SGV19251067HA	SGV19261090HA	SGV19270006HA	SGV19280111HA	SGV19290097HA
SGV19240115HA	SGV19241014HA	SGV19251068HA	SGV19261091HA	SGV19270011HA	SGV19280113HA	SGV19290101HA
SGV19240116HA	SGV19241017HA	SGV19251071HA	SGV19261094HA	SGV19270018HA	SGV19280114HA	SGV19290102HA
SGV19240117HA	SGV19241023HA	SGV19251079HA	SGV19261096HA	SGV19270021HA	SGV19280125HA	SGV19290106HA
SGV19240118HA	SGV19241024HA	SGV19251081HA	SGV19261097HA	SGV19270029HA	SGV19280127HA	SGV19290107HA
SGV19240119HA	SGV19241025HA	SGV19251082HA	SGV19261098HA	SGV19270032HA	SGV19280128HA	SGV19290108HA
SGV19240120HA	SGV19241026HA	SGV19251084HA	SGV19261099HA	SGV19270040HA	SGV19280131HA	SGV19290111HA
SGV19240121HA	SGV19241033HA	SGV19251090HA	SGV19261100HA	SGV19270042HA	SGV19280138HA	SGV19290114HA
SGV19240123HA	SGV19241034HA	SGV19251091HA	SGV19261104HA	SGV19270044HA	SGV19280152HA	SGV19290117HA
SGV19240127HA	SGV19241035HA	SGV19251092HA	SGV19261106HA	SGV19270045HA	SGV19280153HA	SGV19290118HA
SGV19240128HA	SGV19241036HA	SGV19251098HA	SGV19261108HA	SGV19270056HA	SGV19280157HA	SGV19290125HA
SGV19240129HA	SGV19241038HA	SGV19251099HA	SGV19261110HA	SGV19270058HA	SGV19280163HA	SGV19290126HA
SGV19240131HA	SGV19241040HA	SGV19251102HA	SGV19261111HA	SGV19270059HA	SGV19280165HA	SGV19290135HA
SGV19240132HA	SGV19241041HA	SGV19251106HA	SGV19261112HA	SGV19270061HA	SGV19280166HA	SGV19290136HA
SGV19240133HA	SGV19241042HA	SGV19251109HA	SGV19261114HA	SGV19270064HA	SGV19280167HA	SGV19290141HA
SGV19240134HA	SGV19241043HA	SGV19251110HA	SGV19261117HA	SGV19270066HA	SGV19280179HA	SGV19290157HA
SGV19240136HA	SGV19241044HA	SGV19251111HA	SGV19261119HA	SGV19270067HA	SGV19280189HA	SGV19290185HA
SGV19240137HA	SGV19241047HA	SGV19251112HA	SGV19261121HA	SGV19270069HA	SGV19280270HA	SGV19291009HA
SGV19240138HA	SGV19241048HA	SGV19251113HA	SGV19261122HA	SGV19270072HA	SGV19280271HA	SGV19291010HA
SGV19240140HA	SGV19241049HA	SGV19251114HA	SGV19261127HA	SGV19270077HA	SGV19281055HA	SGV19291013HA
SGV19240142HA	SGV19241051HA	SGV19251115HA	SGV19261128HA	SGV19270078HA	SGV19281056HA	SGV19291040HA
SGV19240150HA	SGV19241053HA	SGV19251116HA	SGV19261133HA	SGV19270082HA	SGV19281060HA	SGV19291075HA
SGV19240156HA	SGV19241055HA	SGV19251117HA	SGV19261139HA	SGV19270084HA	SGV19281066HA	SGV19291077HA
SGV19240157HA	SGV19241056HA	SGV19254025HA	SGV19261141HA	SGV19270085HA	SGV19281077HA	SGV19293004HA

SGV19240158HA	SGV19241059HA	SGV19254026HA	SGV19261142HA	SGV19270089HA	SGV19281078HA	SGV19293018HA
SGV19240159HA	SGV19241060HA	SGV19254027HA	SGV19261143HA	SGV19270111HA	SGV19281079HA	SGV19294002HA
SGV19240168HA	SGV19243024HA	SGV19254028HA	SGV19261144HA	SGV19270127HA	SGV19283001HA	SGV19294004HA
SGV19240172HA	SGV19250003HA	SGV19254031HA	SGV19261146HA	SGV19271015HA	SGV19283002HA	SGV19294007HA
SGV19240179HA	SGV19250005HA	SGV19254033HA	SGV19261149HA	SGV19271021HA	SGV19283004HA	SGV19294008HA
SGV19240180HA	SGV19250006HA	SGV19254034HA	SGV19261151HA	SGV19271022HA	SGV19283006HA	SGV19294012HA
SGV19240181HA	SGV19250007HA	SGV19254036HA	SGV19261152HA	SGV19271028HA	SGV19283007HA	SGV19294016HA
SGV19240183HA	SGV19250018HA	SGV19254037HA	SGV19261165HA	SGV19271039HA	SGV19283008HA	SGV19294019HA
SGV19240185HA	SGV19250022HA	SGV19254038HA	SGV19261166HA	SGV19271041HA	SGV19283009HA	SGV19294022HA
SGV19240195HA	SGV19250023HA	SGV19254039HA	SGV19261168HA	SGV19271042HA	SGV19283011HA	SGV19294023HA
SGV19240196HA	SGV19250034HA	SGV19254040HA	SGV19261170HA	SGV19271043HA	SGV19283012HA	SGV19294026HA
SGV19240204HA	SGV19250035HA	SGV19255001HA	SGV19261184HA	SGV19271047HA	SGV19283013HA	SGV19294029HA
SGV19240211HA	SGV19250037HA	SGV19255002HA	SGV19261191HA	SGV19271050HA	SGV19283015HA	SGV19294034HA
SGV19240216HA	SGV19250049HA	SGV19255004HA	SGV19261193HA	SGV19271052HA	SGV19283016HA	SGV19294036HA
SGV19240242HA	SGV19250053HA	SGV19255009HA	SGV19261196HA	SGV19271064HA	SGV19283017HA	SGV19294040HA
SGV19240243HA	SGV19250056HA	SGV19255010HA	SGV19261197HA	SGV19271099HA	SGV19283019HA	SGV19295006HA
SGV19240247HA	SGV19250061HA	SGV19255017HA	SGV19261199HA	SGV19271112HA	SGV19283024HA	SGV19295013HA
SGV19240254HA	SGV19250062HA	SGV19255019HA	SGV19261203HA	SGV19271136HA	SGV19283025HA	SGV19295019HA
SGV19240262HA	SGV19250065HA	SGV19260047HA	SGV19261214HA	SGV19271137HA	SGV19283030HA	SGV19300001HA
SGV19240266HA	SGV19250067HA	SGV19260049HA	SGV19264003HA	SGV19271150HA	SGV19283032HA	SGV19300040HA
SGV19240268HA	SGV19250068HA	SGV19260052HA	SGV19264004HA	SGV19271152HA	SGV19283033HA	SGV19300041HA
SGV19240269HA	SGV19250069HA	SGV19260054HA	SGV19264006HA	SGV19271157HA	SGV19283034HA	SGV19300042HA
SGV19240272HA	SGV19250076HA	SGV19260055HA	SGV19264008HA	SGV19271162HA	SGV19283035HA	SGV19300061HA
SGV19240275HA	SGV19250080HA	SGV19260064HA	SGV19264009HA	SGV19271170HA	SGV19283037HA	SGV19300062HA
SGV19240276HA	SGV19250083HA	SGV19260065HA	SGV19264011HA	SGV19271175HA	SGV19283038HA	SGV19300066HA
SGV19240277HA	SGV19250088HA	SGV19260066HA	SGV19264012HA	SGV19271177HA	SGV19283042HA	SGV19300081HA
SGV19240278HA	SGV19250089HA	SGV19260071HA	SGV19264014HA	SGV19274007HA	SGV19283043HA	SGV19300090HA
SGV19240279HA	SGV19250093HA	SGV19260074HA	SGV19264018HA	SGV19274008HA	SGV19283044HA	SGV19300091HA
SGV19240280HA	SGV19250094HA	SGV19260075HA	SGV19264019HA	SGV19274009HA	SGV19283046HA	SGV19300092HA
SGV19240281HA	SGV19250095HA	SGV19260077HA	SGV19264021HA	SGV19274022HA	SGV19283047HA	SGV19300093HA
SGV19240282HA	SGV19250098HA	SGV19260084HA	SGV19264023HA	SGV19274023HA	SGV19283050HA	SGV19300094HA
SGV19240284HA	SGV19250102HA	SGV19260087HA	SGV19264024HA	SGV19274024HA	SGV19283053HA	SGV19300095HA
SGV19240286HA	SGV19250107HA	SGV19260088HA	SGV19264025HA	SGV19274028HA	SGV19283057HA	SGV19300106HA
SGV19240287HA	SGV19250110HA	SGV19260089HA	SGV19264026HA	SGV19274030HA	SGV19283058HA	SGV19304010HA
SGV19240288HA	SGV19250114HA	SGV19260091HA	SGV19264027HA	SGV19274032HA	SGV19283059HA	SGV19304026HA
SGV19240290HA	SGV19250120HA	SGV19260093HA	SGV19264028HA	SGV19274033HA	SGV19283060HA	SGV19304032HA
SGV19240291HA	SGV19250125HA	SGV19261005HA	SGV19264029HA	SGV19274035HA	SGV19283061HA	SGV19304037HA
SGV19240292HA	SGV19250131HA	SGV19261006HA	SGV19264030HA	SGV19274037HA	SGV19283063HA	SGV19315034HA
SGV19240295HA	SGV19250132HA	SGV19261007HA	SGV19264031HA	SGV19274038HA	SGV19283064HA	SGV15285005HA
SGV19240360HA	SGV19250139HA	SGV19261009HA	SGV19264032HA	SGV19274040HA	SGV19283065HA	SGV16314022HA
SGV19240361HA	SGV19250156HA	SGV19261010HA	SGV19264034HA	SGV19274041HA	SGV19283070HA	SGV16385015HA
SGV19240362HA	SGV19250157HA	SGV19261012HA	SGV19264035HA	SGV19274043HA	SGV19285002HA	SGV18150053HA

<b>Seriennummers luchtweggasoptie N-CAiO</b>						
SGV19248001HA	SGV19258002HA	SGV19258006HA	SGV19258009HA	SGV19258030HA	SGV19268004HA	SGV19268011HA
SGV19248004HA	SGV19258003HA	SGV19258007HA	SGV19258012HA	SGV19258040HA	SGV19268005HA	SGV19268019HA
SGV19248013HA	SGV19258005HA	SGV19258008HA	SGV19258020HA	SGV19268003HA	SGV19268009HA	SGV19318013HA

<b>Seriennummers Service Exchange Unit en Field Replaceable Unit</b>						
SGV19229311HA	SGV19269313HA	SGV19329312HA	SGV14437642HA	SGV15393013HA	SGV17060096HA	SGV18031029HA
SGV19259301HA	SGV19269322HA	SGV19329313HA	SGV14450121HA	SGV15434023HA	SGV17060103HA	SGV18034023HA
SGV19259302HA	SGV19269323HA	SGV19329316HA	SGV14450567HA	SGV15451005HA	SGV17140055HA	SGV18050091HA
SGV19259303HA	SGV19269326HA	SGV19329318HA	SGV14473815HA	SGV15451020HA	SGV17143008HA	SGV18051011HA
SGV19259305HA	SGV19269402HA	SGV19329410HA	SGV14495993HA	SGV15451204HA	SGV17153075HA	SGV18071004HA
SGV19259306HA	SGV19269601HA	SGV12336914HA	SGV15010212HA	SGV15451210HA	SGV17171017HA	SGV18161013HA
SGV19259309HA	SGV19269605HA	SGV13275929HA	SGV15020952HA	SGV15463045HA	SGV17173072HA	SGV18179620HA
SGV19259310HA	SGV19269606HA	SGV13486917HA	SGV15031909HA	SGV16040081HA	SGV17194016HA	SGV18183007HA
SGV19259701HA	SGV19269611HA	SGV13497715HA	SGV15032196HA	SGV16040110HA	SGV17203005HA	SGV18204012HA
SGV19259705HA	SGV19269612HA	SGV14020340HA	SGV15088910HA	SGV16044023HA	SGV17234020HA	SGV18213004HA
SGV19259707HA	SGV19269615HA	SGV14052384HA	SGV15090506HA	SGV16123028HA	SGV17244009HA	SGV18261135HA
SGV19259708HA	SGV19269620HA	SGV14268711HA	SGV15101460HA	SGV16210066HA	SGV17264002HA	SGV18270061HA
SGV19259710HA	SGV19269622HA	SGV14268848HA	SGV15112176HA	SGV16210101HA	SGV17314032HA	SGV18294040HA
SGV19259711HA	SGV19269802HA	SGV14268857HA	SGV15112895HA	SGV16364028HA	SGV17321155HA	SGV18300094HA
SGV19269301HA	SGV19269803HA	SGV14302171HA	SGV15124090HA	SGV16401072HA	SGV17331016HA	SGV18310028HA
SGV19269302HA	SGV19299201HA	SGV14313468HA	SGV15145406HA	SGV16434022HA	SGV17333012HA	SGV18310031HA
SGV19269303HA	SGV19319407HA	SGV14357513HA	SGV15166562HA	SGV16440093HA	SGV17350070HA	SGV18340117HA
SGV19269305HA	SGV19329301HA	SGV14368517HA	SGV15194017HA	SGV16441005HA	SGV17380065HA	SGV18387001HA
SGV19269306HA	SGV19329302HA	SGV14381275HA	SGV15244035HA	SGV16514019HA	SGV17411094HA	
SGV19269308HA	SGV19329308HA	SGV14404046HA	SGV15274023HA	SGV16524027HA	SGV17419612HA	
SGV19269309HA	SGV19329311HA	SGV14425656HA	SGV15290079HA	SGV17020060HA	SGV17494012HA	