

## Field Safety Notice 20-090 Cordring art no 9607S Navelstrengring

Geachte gewaardeerde klant,

Wing Plast heeft de gebruiksaanwijzing voor de koordring herzien en bijgewerkt.

Let op de volgende wijzigingen:

**Afbeelding 1, Waarschuwing: "Rek de ring niet meer uit dan nodig is, hierdoor kan de ring kapot gaan."**

**Afbeelding 5, Waarschuwing: "Laat de navelstrengring niet zoals afgebeeld verdraaien. Hierdoor kan de ring losraken."**

**Waarschuwing: "Controleer de navelstreng de eerste 24 uur daarna zorgvuldig."**

Zorg ervoor dat u de wijzigingen in uw hele organisatie doorgeeft.

Als u een distributeur bent, zorg er dan voor dat u de wijzigingen doorgeeft aan alle klanten die de Cordring gebruiken.

Wing Plast vraagt u vriendelijk om het Customer Reply-formulier in te vullen en naar het mailadres op het Customer Reply-formulier te sturen.

Smålandsstenar 2021-05-12

Lena Nurbo  
Head of Quality Assurance / Regulatory Affairs

Wing Plast AB  
Nitgatan 11, SE- 333 33 Smålandsstenar  
Sweden  
Tel: +46 371 330 30  
Fax: +46 371 330 31