

URGENTE VEILIGHEIDSMEDEDELING



Datum van verzending brief

GE HealthCare Ref. nr. 77005

Aan: Ziekenhuisdirecteuren
Directeur van de IT-afdeling
Hoofd beeldvormingsinformatica
Risicomangers

BETREFT: **Potentieel kwetsbare beveiliging in ViewPoint™ / ViewPoint™ 6 geconfigureerd met Mirth™Connect.**

Veiligheidsprobleem

Het National Institute of Standards and Technology (NIST) heeft in de National Vulnerability Database (NVD) vastgesteld dat NexGen Healthcare Mirth™Connect, vóór versie 4.4.1, een potentieel beveiligingslek heeft waardoor deserialisatie van niet-vertrouwde gegevens mogelijk is (CVE-2023-43208). Er kunnen Mirth-producten zijn geïnstalleerd en geconfigureerd met uw ViewPoint™ / ViewPoint™ 6-systeem door GE HealthCare. Die kwetsbaarheid kan een kwaadaardige dader toelaten om toegang te krijgen tot het systeem en eventueel patiëntgegevens te manipuleren.

Er zijn geen verwondingen gemeld als gevolg van dit probleem.

Door de klant / gebruiker te nemen maatregelen

U kunt uw apparaat blijven gebruiken door de onderstaande instructies op te volgen:

1. Zorg dat ViewPoint™ / ViewPoint™ 6 werkt in een veilig ziekenhuisnetwerk zodat:
 - a. alleen geautoriseerd personeel toegang heeft,
 - b. beveiligingen tegen denial of service en aftappen/network sniffing zijn geïnstalleerd door de netwerkbeheerder, en
 - c. toegang tot internet waar mogelijk is beperkt.
2. Zorg dat ViewPoint™ / ViewPoint™ 6 werkt in een beveiligde Windows-omgeving en bevestig dat alle relevante software up-to-date is en dat de updates voor de besturingssystemen zijn geïnstalleerd.

Vul het bijgevoegde Bevestigingsformulier a.u.b. in en retourneer het aan GE HealthCare, zo spoedig mogelijk na ontvangst en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst. Hiermee wordt de ontvangst van en inzicht in de Mededeling over correctie van medische apparatuur bevestigd.

Zorg ervoor dat alle potentiële gebruikers binnen uw instelling op de hoogte worden gebracht van deze veiligheidskennisgeving.

Bewaar dit document voor uw administratie.

Details betrokken producten

ViewPoint™ / ViewPoint™ 6 gebruikt samen met NextGen Mirth™Connect-versies vóór versie 4.4.1.

Beoogd gebruik:

ViewPoint™ / ViewPoint™ 6 is bedoeld voor gebruik in medische praktijken en in klinische afdelingen en heeft als doel de diagnostische interpretatie van beeldvorming, elektronische documentatie of onderzoek in de vorm van tekst en afbeeldingen en het genereren van medische rapporten, in de eerste plaats voor

diagnostisch ultrageluid. ViewPoint™ / ViewPoint™ 6 geeft de gebruiker de mogelijkheid om afbeeldingen, tekeningen en grafieken in medische rapporten op te nemen. ViewPoint™ / ViewPoint™ 6 is ontworpen om medische afbeeldingen en gegevens te aanvaarden, te verzenden, te tonen, te berekenen, op te slaan en te verwerken, en maakt het de gebruiker mogelijk om met de afbeeldingen metingen uit te voeren en nota's aan de afbeeldingen toe te voegen. De medische afbeeldingen, die ViewPoint™ / ViewPoint™ 6 aan de gebruiker toont, kunnen worden gebruikt voor diagnoses.

ViewPoint™ / ViewPoint™ 6 is alleen bedoeld voor professioneel gebruik.

ViewPoint™ / ViewPoint™ 6 is niet bedoeld om te worden gebruikt als een geautomatiseerd diagnosesysteem.

ViewPoint™ / ViewPoint™ 6 is niet bedoeld om medische apparatuur te bedienen voor procedures in verband met chirurgie.

**Product-
correctie**

GE HealthCare zal alle betrokken producten kosteloos corrigeren en de Mirth™ Connect naar versie 4.4.1 of hoger kosteloos voor u updaten. Een vertegenwoordiger van GE HealthCare zal contact met u opnemen om hiervoor een afspraak te maken.

**Contact-
informatie**

Neem bij vragen of zorgen in verband met deze kennisgeving contact op met GE HealthCare Service of met uw plaatselijke servicevertegenwoordiger. 0800-0994442 (Customer Service Telefoonnummer)

GE HealthCare bevestigt dat deze kennisgeving is gemeld aan de aangewezen toezichhoudende instantie.

Wij verzekeren u dat het handhaven van een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau topprioriteit voor ons is. Bij eventuele vragen kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de bovenstaande contactinformatie.

Met vriendelijke groet,



**BEVESTIGING KENNISGEVING MEDISCHE APPARATUUR
ANTWOORD VEREIST**

Vul dit formulier a.u.b. in en retourneer het aan GE HealthCare, zo spoedig mogelijk na ontvangst en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst. Hiermee wordt de ontvangst van en inzicht in de Mededeling over correctie van medische apparatuur bevestigd.

Naam instelling: _____

Adres: _____

Stad/Provincie/Postcode/Land: _____

E-mailadres klant: _____

Telefoonnummer klant: _____

Locatie-ID/Systeem-ID _____

- Wij bevestigen ontvangst van en inzicht in de bijbehorende Kennisgeving inzake medische apparatuur en dat we alle potentiële gebruikers hebben geïnformeerd en de gepaste maatregelen in overeenstemming met die Kennisgeving hebben genomen of zullen nemen.

Vermeld de naam van de verantwoordelijke persoon die dit formulier heeft ingevuld.

Handtekening: _____

Naam in blokletters: _____

Functie/Titel: _____

Datum (DD/MM/JJJJ): _____

Gelieve feedback te geven over uw locatie.

- GEVAL A:** U hebt een geïnstalleerde versie van Mirth™Connect die werd geïnstalleerd door GE Healthcare.
- GEVAL B:** U hebt geen geïnstalleerde versie van Mirth™Connect of u hebt Mirth™Connect die NIET werd geïnstalleerd door GE Healthcare.
- GEVAL C:** U weet niet of u Mirth™Connect hebt geïnstalleerd of wie het heeft geïnstalleerd.

U kunt uw antwoord geven via uw e-distributie-portaal of via e-mail als volgt:

Via uw e-distributie-portaal: leg een verbinding met uw portaal <https://viewpoint-sw.gehealthcare.com/login> met het locatie-ID van uw account en uw wachtwoord en voer CASE A, B of C in het veld "FMI mandatory feedback" in.



GEVAL A: U hebt een geïnstalleerde versie van Mirth™Connect die werd geïnstalleerd door GE Healthcare.

GEVAL B: U hebt geen geïnstalleerde versie van Mirth™Connect of u hebt Mirth™Connect die NIET werd geïnstalleerd door GE Healthcare.

GEVAL C: U weet niet of u Mirth™Connect hebt geïnstalleerd of wie het heeft geïnstalleerd.

Klik op de knop **Submit** (Verzenden)

Via e-mail: Scan het ingevulde formulier of maak er een foto van en stuur dit/die per e-mail naar: recall.77005@gehealthcare.com

